


	Fresa cabeza de rosa	Broca piloto 15	Broca espiral 24	Broca espiral 28	Broca espiral 30	Broca espiral 32	Broca espiral 35	Broca espiral 38	Broca espiral 45	Broca espiral 50	Broca espiral 55	Avellanador	Broca final avantgarde	Machuelo	Inserción del implante
Diámetro Ø	2.3 - 3.5 - 4.0 - 5.0 mm	1.5 mm	2.4 mm	2.8 mm	3.0 mm	3.2 mm	3.5 mm	3.8 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.5 mm	S / L	dependiendo implante	3.8 - 4.2 - 5.0 - 6.0	3.0 - 3.2 - 3.5 - 3.8 - 4.2 - 5.0 - 6.0
RPM	1200 - 1500	900 - 1200	500 - 700	500 - 700	400 - 700	400 - 700	400 - 700	400 - 600	400 - 600	300 - 500	300 - 500	200 - 500	200 - 500	15 - 25	15 - 25

Figura

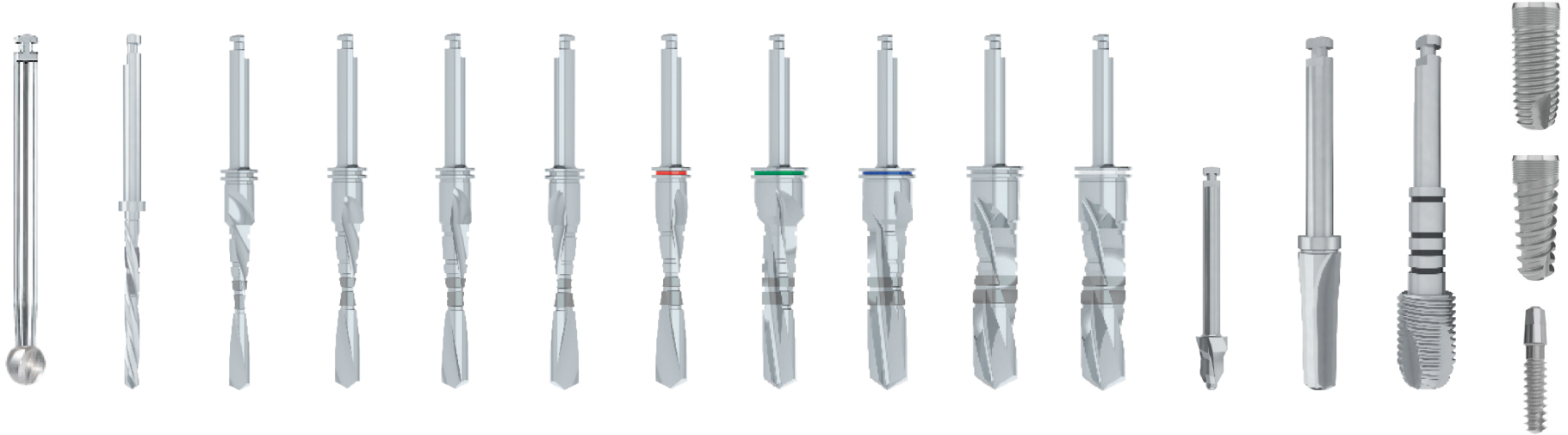

Implante Ø				3.0 mm	3.2 mm	3.5 mm	3.8 mm	4.2 mm	5.0 mm		6.0 mm			Hueso D-1	
Classic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	opcional		opcional	
Avantgarde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	opcional			
Single	●	●	●	●	●	●	opcional					opcional			

Para todos los implantes RatioPlant® Avantgarde se tiene una broca final correspondiente



Marcas de profundidad en todas las brocas y en los medidores correspondientes a las longitudes de los implantes en 8, 10, 11.5, 13 y 16 mm.

